

# **Uwagi do eksploatacji wirówek firmy Meden-Inmed**

## **1.1 Napełnianie wodą**

W celu nalania wody do niecki wirówki należy odkręcić zawory „WODA CIEPŁA” i „WODA ZIMNA” umieszczone na pulpicie wirówki. Temperaturę wlewanej wody można regulować przez odpowiednie dobranie proporcji przepływu ciepłej i zimnej wody.

### **UWAGA !**

1. Dla uniknięcia szkodliwej dla pompy pracy „na sucho” należy napełniać nieckę wirówki do poziomu, przy którym woda zakrywa wszystkie dysze wylotowe.
2. Należy unikać napełniania niecki wirówki wodą powyżej otworu przelewowego.

## **1.2 Mycie po zabiegu**

Po opróżnieniu niecki wirówkę należy umyć. Należy zwrócić uwagę, aby do mycia nie stosować środków i narzędzi, które mogłyby zarysować lub uszkodzić powierzchnię wanny.

### **UWAGA !**

1. Po umyciu niecki należy dokładnie zamknąć zawór „NATRYSK” oraz przestawić zawór „OPRÓŻNIANIE” w pozycję „PRACA”.
2. Zastosowanie do mycia środków pieniących i niedokładne ich wypłukanie, może spowodować powstanie dużej ilości piany po włączeniu masażu wirowego.
3. W zależności od twardości wody używanej do zabiegu należy raz na 14-28 dni przeprowadzić odkamienianie wirówki. Zbyt duża ilość narosłych osadów na dyszach i w pompie wirówki może doprowadzić do uszkodzenia wirówki.

## **1.3 Czyszczenie wirówki**

Do czyszczenia wirówki można stosować ogólnodostępne środki czyszczące do tworzyw sztucznych, które nie wytwarzają piany. Po każdym myciu nieckę wirówki należy dokładnie wypłukać czystą wodą. Należy pamiętać o odkręceniu i oczyszczeniu sitka spustu wody. Brak oczyszczenia sitka może spowodować zanieczyszczenie wody w trakcie następnego zabiegu. Do wycierania wirówki należy używać miękkich ściereczek, które nie będą rysowały powierzchni niecki.

**Zabrania się stosowania środków szorujących !**